


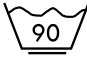


11800 Ambulanzdecke

Anwendung		
Type des Wirkstoffs oder Tensid	Höchstgehalt in der Reinigungsmittel	Sprühen Sie die Matratzenoberfläche mit dem Reinigungsmittel, lassen Sie für einen Zeitraum von Reinigungsaktivierungszeit, dann mit Wasser abspülen und trocken.
2-propanol	35%	
1-propanol	25%	
Ethanol	10%	
Dimethylbenzylalkohol alkyl Ammoniumchlorid	0,2%	
Glukoprotamin	25%	
Das Material kann mit Wasserdampf von 121 ° C für 20 Minuten desinfiziert werden, min. 50 Zyklen		
Verschlechterung der optischen und ästhetischen Werte (z. B. Schrumpfen) beeinflusst nicht der Funktionsparameter des Gewebes.		

Waschanleitung	
	Maximale Waschtemperatur, 90 ° C. Milde Prozess (mindestens 50 Zyklen).
	Verwenden Sie keine Chlorbleiche zu bereinigen
	Nicht bügeln! (nicht auf heiße Oberflächen freizulegen, z.B. ein Heizkörper)
	Trocknen im Wäschetrockner akzeptabel (in einer regulären Temperatur)