

PRODUKT BESCHREIBUNG



AMBULANZDECKE | PATIENTENDECKE

Thermo meetB-Edition

meetB Art.Nr. 11820

BESCHREIBUNG

Pflegeanleitung & Hinweise

Die Decke besteht aus einem Bezug aus Polyurethan beschichtetem Polyester und einer Füllung aus 100 % Polyesterfasern, die perfekt häufigen Waschvorgängen standhält. Der Bezug hält sämtlichen Flüssigkeiten stand. Er ist atmungsaktiv und mit Silberionen behandelt. Dank der molekularen Struktur der Beschichtung, ermöglicht dies den Luftaustausch. Die Reinigungsfrequenz hängt von dem Zustand der Decke ab. Die Verwendung der meetB Patientendecke Thermo, ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Wäschevolumens.

Maschinelle Reinigung:

Die Patientendecke kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (ohne Chlor) gewaschen werden. Die empfohlene Menge an Waschmittel und Desinfektionsmittel beachten. Die Waschtemperatur darf 95°C nicht überschreiten. Bei dem Reinigungszyklus ist das Schleudern bei 1.000 Umdrehungen/Minute wichtig.

Wichtiger Hinweis:

Kein Chlor oder chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt darf nicht sterilisiert werden. Es dürfen keine Weichspüler verwendet werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit gefärbten Produkten.

Trockner: Zwischen 60 °C und 90 °C mindestens 45 Minuten im Trockner trocknen.

WICHTIG: Das Wasser kann durch kleine Mikrorisse in das Innere der Decke eindringen. Nur die Hitze des Trockners ermöglicht es, das Wasser aus der Decke zu entfernen. Nicht bügeln.

Achtung

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält wichtige Hinweise zur Wartung und zum Gebrauch dieses Produktes. Bewahren Sie diese deshalb gut auf und geben Sie diese bei einem Besitzerwechsel unbedingt an den neuen Eigentümer weiter.

Wichtige Hinweise: Vor der Benutzung der Patientendecke muss diese Bedienungsanleitung unbedingt vollständig gelesen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen, keine Haftung übernehmen. Eine Verwendung im Einsatz darf erst erfolgen, wenn sich die Benutzer mit der richtigen und sicheren Handhabung vertraut gemacht haben. Wir empfehlen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Rettungsgeräts regelmäßig zu üben, um im Einsatzfall ein absolut sicheres Handling zu gewährleisten. Die gezeigten Anwendungsmöglichkeiten stellen keinerlei medizinische Empfehlungen dar.

Lieferumfang

Überprüfen Sie sofort nach Erhalt den Lieferumfang. Fehlende Teile müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt reklamiert werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 Patientendecke
- 1 Bedienungsanleitung



PRODUKT BESCHREIBUNG



AMBULANZDECKE | PATIENTENDECKE

Thermo meetB-Edition

meetB Art.Nr. 11820

BESCHREIBUNG

Gewährleistung

Wir garantieren die Mängelfreiheit des von uns gelieferten Produktes innerhalb der gesetzlichen Fristen. Eine Erfüllung dieser Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz der defekten Patientendecke. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe an den Kunden. Als Nachweis dient der Lieferschein oder die Rechnung des Lieferanten. Die Gewährleistung beschränkt sich ausdrücklich auf Ersatz oder Reparatur des defekten Produkts. Etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. Jegliche Änderungen oder Reparaturen einer nicht von uns bevollmächtigten Stelle, führen zum sofortigen Wegfall sämtlicher Gewährleistungsansprüche.

Kundendienst:

Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch von uns zertifizierte Servicestellen erfolgen. Sollten Sie Ersatz- oder Zubehörteile benötigen, verwenden Sie nur von uns freigegebene Teile. Bei Bestellung geben Sie unbedingt die Seriennummer des Produktes an.

Achtung:

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör, können zu einer tödlichen Gefahr für Anwender oder der zu rettenden Person führen!

Anhang:

Produktempfehlungen zur Oberflächendesinfizierung/ Reinigung der bakteriostatischen

Patientendecke: Bode Chemie

Als gebrauchsfertige Produkte:

Bacillol AF

Bacillol 30 Foam

Mikrobac Virucidal Tissues

Dismozon plus 0.4% (Hinweis: Produktrückstände mit Wasser entfernen)

Als zu verdünnende Produkte:

Mikrobac forte 0.5% Kohrsolin FF 0.5% Schülke & Mayr GmbH

mikrozid sensitive liquid mikrozid sensitive wipes Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat

pursept AF oder antifact AF N

Technische Daten

Material: Polyurethan beschichtete Polyester

Einlage: Polyesterfasern

Farbe außen: dunkelblau

Farbe Patientenseite: hellblau

Abmessung: 110 x 190 cm

Gewicht: 1.200 g

Feuerwiderstandsklasse: M1



meetB
gesellschaft für medizintechnik
Vertrieb mbH

Bildung. Kompetenz. Innovation.

meetB® gesellschaft für
medizintechnik Vertrieb mbH

+49(0)33205 24 99-0

firma@meetB.de

Tulpenweg 24 | D-14552 Michendorf | www.meetB.de

