

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH SÄMTLICHE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH!

Produktbeschreibung

Der Nasopharyngealtubus mit festem Haltering besteht aus einem festen Haltering und einem Tubus.

Folgende Nasopharyngealtuben mit festem Haltering sind **ohne** Naturlatex hergestellt:

- Robertazzi Nasopharyngealtuben (grün, Material Mediprene) – Produktnummern beginnen mit 1231 und 185410
- Robertazzi Nasopharyngealtubussets (grün, Material Mediprene) – Produktnummern 1231 und 1232
- PVC Nasopharyngealtuben (durchsichtiges, transparentes Material) – Produktnummern beginnen mit 1233/125410
- PVC Nasopharyngealtubussets (durchsichtiges, transparentes Material) – Produktnummern 1233 und 1234

Folgende Nasopharyngealtuben mit festem Haltering enthalten Naturlatex und dürfen bei Patienten mit Naturlatexallergien nicht verwendet werden!

- Robertazzi Nasopharyngealtuben (gelb, Latexmaterial) – Produktnummern beginnen mit 1230/185300

Vorgesehene Verwendung

Herstellen eines durchgängigen Atemwegs bei Patienten mit Blockierung oder möglicher Blockierung der Nasenhöhle oder des Nasopharynx.

Kontraindikationen

Latexallergie (nur bei Produkten, die Naturlatex enthalten), traumatische Hirnverletzung oder Mittelgesichtsfrakturen, Schädelbasis- oder Siebbeinfrakturen, Antikoagulantientherapie, Blutgerinnungsstörungen, transphenoidale Operation und frische postoperative Rhinoplastik oder Septoplastik, da der Tubus Gewebetrauma oder Schäden an der frisch veränderten strukturellen Integrität des Operationssitus verursachen kann.

Gebrauchsanleitung

1) Tragen Sie eine kleine Menge wasserlöslichen Gleitmittels auf den Tubus auf. Schieben Sie den Tubus vorsichtig in das Nasenloch, bis der feste Haltering sich am Nasenloch befindet. Wenden Sie **keine** übermäßige Kraft an. Mit Hilfe leichter Drehbewegungen wird das Einführen erleichtert. Ist ein Vorschieben nicht möglich, führen Sie den Tubus in das andere Nasenloch ein.

2) Achten Sie bei Verwendung eines Absaugkatheters, der durch das zentrale Lumen der nasopharyngealen Atemwege führt, auf die richtige Größe, und tragen Sie vor dem Einführen Gleitmittel auf die Außenseite des Absaugkatheters auf. Anschließend können Sekret und Körperflüssigkeiten abgesaugt werden.

Halten Sie den Haltering mit einer Hand fest, während Sie den Absaugkatheter mit der anderen Hand einführen.

Vorsicht: Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie den Absaugkatheter in den Tubus einführen.

3) Wenn der Nasopharyngealtubus in Verbindung mit einer Gesichtsmaske verwendet wird, achten Sie darauf, dass beim Anlegen der Gesichtsmaske kein Druck auf den Tubus ausgeübt oder dieser weiter in das Nasenloch hinein geschoben wird.



Warnhinweise

Einige Produkte enthalten Naturlatex, was zu allergischen Reaktionen führen kann. Bitte lesen Sie das Produktetikett.

VORSICHT:

- Falls Widerstand auftritt, darf das System **nicht** kraftvoll durch die Nase geführt werden.
- Wenn Läsionen oder Infektionen der Nase vorliegen, darf **kein** Versuch des Einführens unternommen werden.



Eine Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu verminderter Leistung oder zum Verlust ihrer Funktionsfähigkeit führen. Durch eine Wiederverwendung von Einmalprodukten kann es zur Exposition mit Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Pilzen oder Prionen kommen. Zulässige Reinigungs- und Sterilisierungsmethoden und Anweisungen für eine Wiederaufbereitung gemäß der ursprünglichen Spezifikationen sind für diese Produkte nicht verfügbar. Dieses Produkt darf weder gereinigt, desinfiziert noch sterilisiert werden.

Anweisung zur Lagerung

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Sterilbarriere oder die Verpackung des Produkts beschädigt ist.

Erläuterung wichtiger Symbole und Kennzeichnungen auf dem Produktetikett.

| | |
|--|---|
| SIZE | Produktgröße |
| Ch. | 1 Ch. = 1/3mm |
| Fr. | 1 Fr. = 1/3mm |
| I.D. | Innendurchmesser |
| O.D. | Außendurchmesser |
| Qty | Menge, Anzahl der Artikel |
|  | Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt |
|  | Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex |
|  | Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist |
|  | „Grüner Punkt“ Verpackungsrecycling |



Rx Only

Sterilisationsverfahren: siehe Produktetikett

STERILE | EO

STERILE | R