


FLÄCHEN-  
DESINFEKTIONSMITTEL

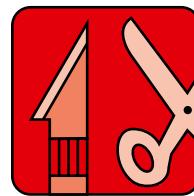

INSTRUMENTEN-  
DESINFEKTIONSMITTEL

# Aldasan® 2000 / Aldosan® 2000 - CH

Desinfektions- und Reinigungskonzentrat  
für Flächen, Inventar, Instrumente und  
Medizinprodukte

Concentré désinfectant et nettoyant pour  
les surfaces, le mobilier, l'instrumentation  
médicale et dispositifs médicaux



CE 0482

# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen

Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH  
Konzentrat

Nur für gewerbliche Anwender

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:  
9,8 g Formaldehyde, 9,9 g Glutaral, Sodium alkyl ether sulphate, Isotridecanol (ethoxylated)

## ANWENDUNGSGEBIETE

- bei allen bakteriellen (inkl. Tbc), Virus- und Hautpilz-Infektionen zur Desinfektion und Reinigung (auch von Medizinprodukten) von Flächen, Inventar und Instrumenten in einem Arbeitsgang, für Textilien, wie z. B. Mopps, Scheuertücher u. ä.)
- Bekämpfung des infektiösen Hospitalismus
- Desinfektion und Reinigung hautpilzkontaminierten Fußböden und Gegenstände (Badematten und -roste, Schuhe, Strümpfe u. a.)
- Desinfektion und hygienische Sauberhaltung aller sanitären Einrichtungen
- auch für den Einsatz in Ultraschallbecken geeignet

## ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH ist ein flüssiges Konzentrat, mit dem jede gewünschte Gebrauchsverdünnung durch Zugabe von Wasser (max. Zimmertemperatur) hergestellt werden kann. Immer erst Wasser einfüllen und dann Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH zugeben.

### Wischdesinfektion gem. VAH-Verfahren 2002 mit Mechanik, hohe Belastung

bakterizid, levurozid, fungizid	1,00 % - 15 mn
	0,75 % - 30 mn
	0,50 % - 1 h
	0,25 % - 4 h

### Instrumentendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2002, hohe Belastung

bakterizid, levurozid, fungizid	2,00 % - 30 mn
	1,00 % - 1 h
mykobakterizid	3,00 % - 30 mn
	2,00 % - 1 h

### Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie

begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	0,50 % - 15 mn
Adenovirus*	1,00 % - 5 mn
Papovavirus/Polyomavirus/SV40*	0,50 % - 1 h
Poliovirus*	2,00 % - 15 mn

### zur Seuchenbekämpfung gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz IfSG

Flächendesinfektion	4,00 % - 4 h
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)	1,00 % - 1 h 2,00 % - 15 mn

\* DVV 2015 (Susp. Test)

# Mode d'emploi

à lire attentivement!

Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH  
Concentré

Pour usage professionnel

## PRINCIPES ACTIFS

100 g contiennent:  
9,8 g de formaldéhyde, 9,9 g de glutaral, sodium alkyl ether sulphate, isotridecanol (ethoxylated)

## DOMAINES D'APPLICATION

- Désinfection et nettoyage simultanés (dispositifs médicaux inclus) de l'instrumentation, du mobilier, des surfaces et des textiles comme les balais à franges, les serpillères etc. en cas de toute infection d'origine bactérienne (BK inclus), virale ou fongique.
- lutte contre les infections hospitalières
- désinfection et nettoyage des sols et des objets (sorties de bain, chaussures, socquettes etc.) contaminés par les dermatophytes
- désinfection et entretien hygiénique de toutes les installations sanitaires
- approprié pour utilisation dans les appareils à ultra-sons

## MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH est un produit concentré liquide avec lequel il est possible de fabriquer toute solution souhaitée en lui ajoutant de l'eau (température max.: ambiante). Toujours remplir le récipient d'eau d'abord (température ambiante) et ajouter Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH ensuite.

### Désinfection par essuyage conformément aux méthodes de la VAH de 2002, avec effet mécanique, contamination importante

bactéricide, levurocide, fongicide	1,00 % - 15 mn
	0,75 % - 30 mn
	0,50 % - 1 h
	0,25 % - 4 h

### Désinfection de l'instrumentation par essuyage conformément aux méthodes de la VAH de 2002, contamination importante

bactéricide, levurocide, fongicide	2,00 % - 30 mn
	1,00 % - 1 h
mycobactéricide	3,00 % - 30 mn
	2,00 % - 1 h

### Tests conformément aux directives de DVV/RKI

efficace vis-à-vis des virus enveloppés* (VHB/VIH/VHC inclus) conf. aux recommandations de la RKI de 1/2004*	0,50 % - 15 mn
adéno virus*	1,00 % - 5 mn
papova virus/polyoma virus/SV 40*	0,50 % - 1 h
polio virus*	2,00 % - 15 mn

### Désinfection des surfaces dans le cadre de la lutte contre les épidémies conf. au § 18 de la loi pour la protection contre les épidémies

désinfection des surfaces	4,00 % - 4 h
Normes européennes (contamination importante)	1,00 % - 1 h 2,00 % - 15 mn

\* DVV 2015 (Susp. Test)

**Wichtig!**

Das Desinfektionsmittel zugeben. Das Desinfektionsgut in die Gebrauchsverdünnung so einlegen, dass alle Oberflächen benetzt sind. Behälter mit Deckel verschließen. Nach Desinfektion/Reinigung Instrumente mit Wasser, bei Endoskopen mit keimfreiem Wasser abspülen.

**Important:**

Disposer le matériel à désinfecter dans la solution de manière que toutes les surfaces soient en contact avec le liquide. Bien fermer le récipient utilisé pour la désinfection avec un couvercle. A la fin du temps de contact, rincer les instruments avec de l'eau potable du robinet, et les endoscopes avec de l'eau microbiologiquement pure.

Die Gebrauchslösung ist jeweils frisch anzusetzen (gem. Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, hrsg. vom RKI).

Gebrauchslösungen ohne organische Belastung (Desinfektion vorgereinigter Instrumente) sind mindestens 14 Tage wirksam.

Haltbarkeit der unbelasteten Gebrauchslösung bei sachgerechter Lagerung (kühl und trocken) in sauberen, fest verschlossenen Gefäßen: 4 Wochen.

**Lysoform - Hygiene mit System**

<b>Konzentration</b>	<b>0,25 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1,0 %</b>
<b>Dosiersystem (auf 8 Liter Wasser)</b>			
Dosierpumpe (1 Hub $\Delta$ 20 ml)	1 Hub	2 Hübe	4 Hübe
Lysoform-Dosierhilfe	einmalige Einstellung auf die gewünschte Konzentration		

**WICHTIG:** Immer erst Wasser einfüllen und dann Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH zugeben. Die Menge des Wassers errechnet sich, wenn von der gewünschten Menge der Gebrauchsverdünnung die Menge des Desinfektionsmittels abgezogen wird.

**WARN- UND LAGERHINWEISE**

- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.
- Beim Umgang mit dem unverdünnten Präparat geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Haltbarkeit der unbelasteten Gebrauchslösung: 14 Tage.
- Lüften nach Anwendung als Flächendesinfektionsmittel oder in geschlossenem Behälter (Instrumentendesinfektionsmittel) anwenden.

**EIGENSCHAFTEN**

- bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid und viruzid
- umfassend wirkendes, materialschonendes Flächen-, Inventar-, Textilien- und Instrumenten-Desinfektionsmittel
- reinigungsaktiv ohne Zusatz von Reinigungsmitteln auch bei Verschmutzungen mit organischen Substanzen wie Fett, Eiweiß, Serum
- frischer Geruch
- kalkwasserfest
- biologisch abbaubar

Préparer les solutions désinfectantes juste avant leur utilisation (conf. aux Directives pour „l'Hygiène Hospitalière et la Prévention des Infections“ de l'Institut Robert Koch).

Les solutions désinfectantes sont efficaces pendant environ 14 jours, à condition qu'elles ne soient pas souillées par des déchets organiques.

Conservation de la solution prête à l'emploi, non souillée, entreposée de façon appropriée (au frais et au sec) dans des récipients propres et bien fermés: 4 semaines.

**Lysoform - L'Hygiène avec Système**

<b>concentration</b>	<b>0,25 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1,0 %</b>
<b>système de dosage (pour 8 l d'eau)</b>			
Pompe doseuse (1 pression $\Delta$ 20 ml)	1 pression	2 pressions	4 pressions
système de dosage Lysoform	un seul ajustement pour obtenir la concentration voulue		

**IMPORTANT:** Toujours remplir le récipient d'eau d'abord (à la température ambiante) et ajouter Aldasan® 2000/Aldosan® 2000-CH ensuite. La quantité d'eau est calculée en soustrayant la quantité de désinfectant à ajouter de la quantité de solution désinfectante que l'on veut préparer.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE**

- Conserver les désinfectants dans un endroit frais et sec, mais à l'abri du gel, bien ventilé et hors de la portée des enfants.
- Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux pendant la manipulation du produit concentré!
- Ne plus utiliser une fois la date de péremption atteinte!
- Durée de vie de la solution prête à l'emploi en l'absence de déchets organiques: 14 jours.
- Aérer après l'utilisation sur les surfaces ou utiliser dans des récipients bien fermés (désinfection des instruments).

**PROPRIÉTÉS**

- bactéricide, tuberculicide, mycobactéricide et virucide
- bonne efficacité et bonne compatibilité avec les surfaces, le mobilier, les textiles, l'instrumentation
- nettoie sans adjonction de détergents supplémentaires même en cas de souillure importante avec des déchets organiques (corps gras, albumine, sérum)
- odeur fraîche
- résiste au calcaire
- bio-dégradable

## BESONDERE HINWEISE

### a) Inkompatibilitäten

Durch Beimischung üblicher Reinigungsmittel kann die desinfizierende Wirkung von Aldasan® 2000/Aldosan® 2000 - CH eingeschränkt bzw. aufgehoben werden.

### b) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch

Sollte das Präparat Aldasan® 2000/Aldosan® 2000 - CH durch unsachgemäßen Gebrauch in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Als Sofortmaßnahme wird die Verdünnung des Präparates empfohlen: bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen reichlich mit Wasser spülen.

### c) Sonstiges

Gegenstände/Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind nach abgeschlossener Desinfektion mit Trinkwasser nachzuspülen!

d) Aldasan® 2000/Aldosan® 2000 - CH sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

## VERSANDEINHEIT/PACKUNG

6 x 1 Liter-Flasche	Art.-Nr. 6241
2 x 5 Liter-Kanister	Art.-Nr. 6255
1 x 20 Liter-Kanister	Art.-Nr. 6260

## Zubehör

Dosierpumpe für 5-Liter-Kanister (1 Hub $\Delta$ 20 ml)	Art.-Nr. 3135
--	---------------

## Hygiene-Technik

Lysoform-Dosierhilfe	Art.-Nr. 9174
----------------------	---------------

## OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

### a) Incompatibilités:

Le mélange avec les détergents usuels risque de réduire ou d'éliminer le pouvoir désinfectant de l'Aldasan® 2000/Aldosan® 2000 - CH.

b) Contre-mesures en cas d'utilisation incorrecte: Au cas où Aldasan® 2000/Aldosan® 2000 - CH viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), consulter un médecin immédiatement.

Diluer le produit sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient. En cas de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.

### c) Généralités:

Les objets/surfaces entrant en contact avec les produits alimentaires doivent être rincés avec de l'eau potable après la désinfection

d) Utilisez Aldasan® 2000/Aldosan® 2000 - CH en toute sécurité! Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Ce produit a un certificat et figure sur les listes appropriées.

## CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

6 x 1 litre (flacons)
2 x 5 litres (bidons)
1 x 20 litres (bidons)

## Accessoires

pompe doseuse pour le bidon  
(1 pression  $\Delta$  20ml)

## Aide technique

système de dosage Lysoform

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.  
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –  
Nous vous rappellerons aussitôt!

D: +49 30 - 77 99 2-0  
CH: +41 56 - 441 69 81

 **Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin  
Telefax +49 30 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM  
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

 **LYSOFORM**  
**Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG**  
Postfach 444, 5201 CH-Brugg/Windisch  
Telefon +41 56 - 441 69 81, Telefax +41 56 - 442 41 14  
BAG-Nr. CHZB2174